


Werkinstructie juist gebruik chirurgisch masker


opdoen chirurgisch masker

1

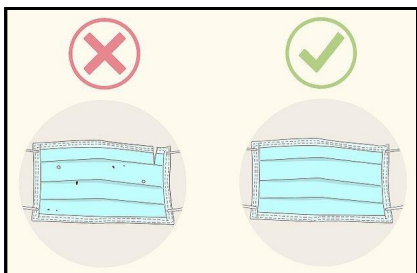


Check het masker op defecten.
Gebruik geen masker met
scheuren of gaatjes.

2

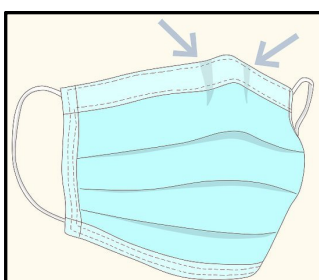


Houd de stijve buigzame rand van
het kapje aan de bovenkant voor
je het masker opzet

3

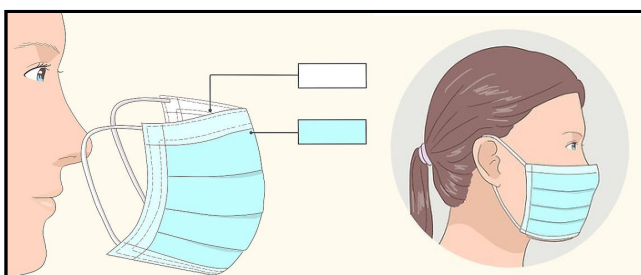


Til het masker aan de elastiekjes
op en houd de witte kant aan de
gezichtszijde en de blauwe kant
aan de buitenkant
Doe de elastiekjes achter je oren

4

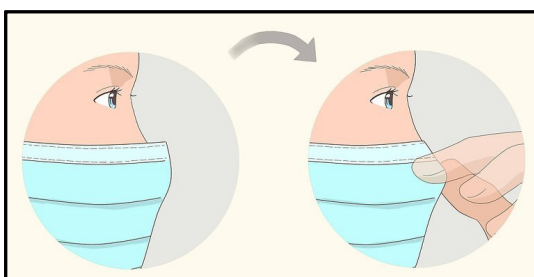

Zorg dat het neusstukje op zijn
plaats zit
Knijp nu met je duim en
wijsvinger in het buigbare
gedeelte en buig het over de brug
van je neus

5

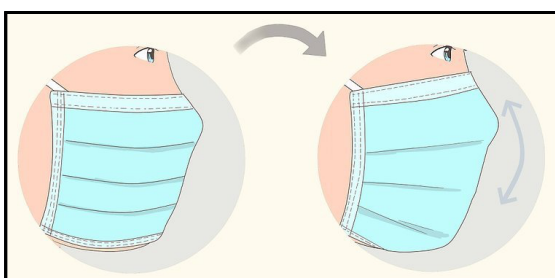

Zorg dat de bovenste rand over
de neus loopt en doe de onderste
rand tot onder de kin.


afdoen chirurgisch masker

1



Raak nooit de voorkant van het masker aan
Pak de lusjes achter je oren
Beweeg zo het masker naar voren van je gezicht af

2

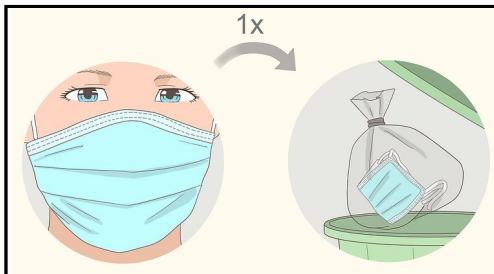

Gooi het masker direct na afdoen weg.